

Hygienische Wiederaufbereitung

BETA X VET Ophthalmoskop

Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



WARNUNG! Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.



HINWEIS! Dieses Symbol wird für Informationen bezüglich Installation, Betrieb oder Wartung verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

	Nachfolgende Angaben zur hygienischen Wiederaufbereitung müssen gemäß nationalen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Empfehlungen umgesetzt werden. Die beschriebenen Maßnahmen zur hygienischen Wiederaufbereitung ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften.
	Nehmen Sie bei Kontaminationsverdacht eine hygienische Aufbereitung vor.
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG gibt nur die empfohlenen Mittel und Verfahren frei.
	Die hygienische Wiederaufbereitung ist nur von einer Person mit ausreichender hygienischer Sachkompetenz durchzuführen.
	Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel.
	Das Gerät inklusive deren Zubehörteile ist nicht für den menschlichen Gebrauch geeignet und dürfen niemals am Menschen verwendet werden.
Wird ein anderes als in dieser Anleitung beschriebenes Aufbereitungsverfahren verwendet, muss ein zugelassenes und validiertes Aufbereitungsverfahren durchgeführt werden.	
Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.	
Einschränkung der Wiederaufbereitung	Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Geräts.

Auswahl des Aufbereitungsverfahrens



Die hygienische Klassifizierung (Spaulding Classification) der Geräte sowie die Entscheidung für eine der angebotenen Aufbereitungsverfahren liegen in der Verantwortung des Anwenders, bzw. der qualifizierten für die Aufbereitung verantwortlichen Person.

Hierfür muss die jeweilige Anwendungssituation berücksichtigt und die Vorgaben von Krankenhaus-/praxisinternen Regelungen, von nationalen Richtlinien und Empfehlungen und von Normen und Gesetzen erfüllt werden.

Für die Auswahl des Aufbereitungsverfahrens wurden die Anforderungen von humanen Medizinprodukten herangezogen. Bitte überprüfen Sie, ob bei Ihrem veterinären Einsatz besondere Erreger auftreten, für die besondere Anforderungen gemäß ihren länderspezifischen Gesetzgebungen erfüllt werden müssen.

Reinigende Wischdesinfektion

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

Ausstattung

- alkoholisch + quartäre Ammoniumverbindungen (z. B. Super Sani-Cloth)
- Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufbereitungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass diese nicht schäumen.

Durchführung

- Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie zuerst mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Tuch reinigen, bevor Sie mit einem Desinfektionstuch desinfizieren.
- Reinigen und desinfizieren Sie das Instrument manuell.
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
- Wischen Sie die berührten Flächen besonders gründlich: z. B. Bedienelemente, Drehregler, Feststellelemente.
- Um die drehbaren Elemente aufzubereiten, nehmen Sie ein frisches Aufbereitungsmitteltuch.
- Bereiten Sie alle drehbaren und beweglichen Elemente nacheinander auf:
 - Drehen Sie hierfür alle drehbaren Elemente Schritt für Schritt. Wischen Sie jede Stelle gründlich mit dem Aufbereitungsmitteltuch, bevor Sie zur nächsten Stelle weiterdrehen.
 - Wiederholen Sie diese Schritte, bis die drehbaren Elemente jeweils an jeder Position mindestens dreimal gewischt wurden.
 - Wischen Sie beim Ein/Aus-Schalter und Helligkeitsregler hierbei die Rillen gründlich in Rillenrichtung.
 - Wischen Sie bei allen Rädern auch die Seitenflächen.
 - Wischen Sie den Kippschalter auch von den Seiten.
- Entfernen Sie die Rückstände gründlich mit einem mit sauberem Wasser getränkten Tuch und trocknen Sie das Gerät. Beachten Sie zusätzlich die Anweisungen des Herstellers des Aufbereitungsmittels.

3. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten oder im Falle von nicht entfernbaren Verschmutzungen entsorgen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch hinsichtlich seiner einwandfreien Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.