

Hygienische Wiederaufbereitung

HEINE DELTA® X

Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



WARNUNG! Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.

HINWEIS! Dieses Symbol wird für Informationen verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

	Nachfolgende Angaben zur hygienischen Wiederaufbereitung müssen gemäß nationalen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Empfehlungen umgesetzt werden. Die beschriebenen Maßnahmen zur hygienischen Wiederaufbereitung ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften.
	Nehmen Sie bei Kontaminationsverdacht eine hygienische Aufbereitung vor.
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG gibt nur die hier empfohlenen Mittel und Verfahren frei.
	Die hygienische Wiederaufbereitung ist nur von einer Person mit ausreichender hygienischer Sachkompetenz durchzuführen.
	Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel.
	Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.
	Eine maschinelle Aufbereitung des Dermatoscops und der Kontaktscheiben darf nicht durchgeführt werden.
	Wird ein anderes als in dieser Anleitung beschriebenes Aufbereitungsverfahren verwendet, muss ein zugelassenes und validiertes Aufbereitungsverfahren durchgeführt werden.
	Schalten Sie das Gerät während der Aufbereitung nicht ein.
	Verwenden Sie kein Octenisept, da dies zu einem Ausbleichen des Materials führen kann.
	Achten Sie darauf, dass nur vollkommen trockene Kontaktscheiben auf das Dermatoskop aufgesetzt werden.
	Für die von Ihnen ausgewählte Aufbereitung für ihr Smartphone und ihre Smartphonehülle übernimmt HEINE keine Garantie.
Einschränkung der Wiederaufbereitung	Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Produkts. Bei der CPP-Kontaktscheibe sind maximal 50 Aufbereitungszyklen für die Verwendung bei intakter Haut zulässig. Bei der Verwendung an Schleimhäuten darf nur die Kontaktscheibe CPP einmalig und zuvor unbenutzt verwendet werden und muss nach der Anwendung unmittelbar entsorgt werden.

Auswahl des Aufbereitungsverfahrens



Die hygienische Klassifizierung (Spaulding Classification) der Geräte sowie die Entscheidung für eine der angebotenen Aufbereitungsverfahren liegen in der Verantwortung des Anwenders, bzw. der qualifizierten für die Aufbereitung verantwortlichen Person.

Hierfür muss die jeweilige Anwendungssituation berücksichtigt und die Vorgaben von krankenhaus-/praxisinternen Regelungen, von nationalen Richtlinien und Empfehlungen und von Normen und Gesetzen erfüllt werden.

Reinigende Wischdesinfektion

Für Dermatoskop, CPP und CPG Kontaktscheiben sowie den Smartphoneadapter

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

Die Kontaktscheibe kann während der hygienischen Aufbereitung auf das Dermatoskop aufgesteckt sein oder separat aufbereitet werden.

2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

Ausstattung

- Reinigende Wischdesinfektionsmittel:
alkoholisch + quartäre Ammoniumverbindungen (z. B. Super Sani-Cloth®)

Durchführung

- Reinigen und desinfizieren Sie das Dermatoskop, die Kontaktscheiben und den Smartphoneadapter manuell.
- Wischen Sie alle Oberflächen gründlich bis keine Verschmutzung mehr zu sehen ist, mindestens 3-mal mit jeweils einem neuen Tuch.
- Bei schwer zu erreichenden Stellen kann bei Notwendigkeit eine Nylonbürste verwendet werden.
- Entfernen Sie die Rückstände gründlich mit einem mit sauberem Wasser getränkten Tuch und trocknen Sie das Gerät. Beachten Sie zusätzlich die Anweisungen des Herstellers des Aufbereitungsmittels.

3. Kontrolle und Funktionsprüfung



Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch hinsichtlich seiner einwandfreien Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.