

HEINE Smartphone Adapter für DELTA 30 PRO, DELTA 30, DELTAone oder DELTA X

Digitale dermatoskopische Dokumentation mit der Smartphone-Kamera.



1. Funktion des Smartphone Adapters

Mit dem Smartphone Adapter können Sie praktisch jedes Smartphone verwenden, unabhängig von der Kameraanordnung.



2. Überblick

⚠ Mit dem Adapter werden zwei Fixierbuttons in unterschiedlicher Höhe geliefert. Halten Sie den Fixierbutton [01] vor dem Anbringen auf der Handyschale von dem Magneten getrennt!

Sollten beide dennoch aneinander haften, trennen Sie die Schraube [02] vom Adapter-Arm. Drehen Sie die Schraube direkt in das Gewinde des Magnethalters und schieben Sie die beiden Elemente auseinander.



Sie benötigen ein DELTA 30 PRO, DELTA 30, DELTAone oder DELTA X und den passenden Smartphone Adapter, bestehend aus Fixierbutton + Adapter, sowie Ihr Smartphone und eine dazu passende Handyschale*. Die Handyschale sollte eine harte Rückseite aus Polycarbonat oder Acrylglas haben.

3. Fixierbutton anbringen

Der erhöhte Button L eignet sich für überstehende Kameralinsen. Für alle anderen Modelle, wählen Sie den flacheren Button.

Schutzfolie abziehen und den Fixierbutton rechts unterhalb der ausgewählten Kameralinse mittig fest auf der Handyschale aufdrücken.





4. Smartphone Adapter einrichten

Als nächstes bringen Sie den Adapter auf dem Fixierbutton an. Lösen Sie die Schraube leicht. Hat Ihr Smartphone nur eine Kamera, fixieren Sie den Adapter mittig vor dieser Kamera.



Hat Ihr Smartphone mehrere Kameras, sollten Sie zunächst testen, welche der Kameras die Hauptkamera ist: Legen Sie den Adapter-Arm so auf die Rückseite des Smartphones, dass eine der Kameralinsen im Zentrum liegt. Ist das Sichtfeld auf das Motiv in der Kameraansicht klar? Wenn alles passt, den Adapter-Arm vor dieser Kamera mit der Schraube festdrehen.



5. Anbindung an das Dermatoskop



Der Magnet des Adapters hält nun das Handy samt Schale auf dem Fokussiering des Dermatoskops.

Jetzt können Sie mit der Kamerafunktion Ihres Smartphones wie gewohnt Fotos machen.



Ein Video-Tutorial finden Sie hier: www.heine.com/how-to-smartphone-adapter-mag

*Das Smartphone und die Handyschale sind nicht im Lieferumfang enthalten.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

Seite 2 | 2

10 | 25.

QUALITY
MADE IN GERMANY

