

Hygienische Wiederaufbereitung

HEINE visionPRO CS1

Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



WARNUNG! Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.



HINWEIS! Dieses Symbol wird für Informationen verwendet, die wichtig, jedoch nicht mit Gefahren verbunden sind.

	Nachfolgende Angaben zur hygienischen Wiederaufbereitung müssen gemäß nationalen Normen, Gesetzen, Richtlinien und Empfehlungen umgesetzt werden. Die beschriebenen Maßnahmen zur hygienischen Wiederaufbereitung ersetzen nicht die jeweils für den Betrieb gültigen Vorschriften.
	Nehmen Sie bei Kontaminationsverdacht eine hygienische Aufbereitung vor.
	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG gibt nur die hier empfohlenen Mittel und Verfahren frei.
	Die hygienische Wiederaufbereitung ist nur von einer Person mit ausreichender hygienischer Sachkompetenz durchzuführen.
	Beachten Sie die Angaben der Hersteller der Aufbereitungsmittel.
	Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten.
	Trennen Sie das Gerät vor der Aufbereitung von der Stromversorgung.
	Lebensgefahr durch Stromschlag! Netzteil nur in trockener Umgebung verwenden. Spritzwasser vermeiden. Niemals in Flüssigkeiten tauchen. Lebensgefahr durch Stromschlag, wenn Flüssigkeit in das Innere des Netzteils gelangt! • Vor dem Reinigen Netzteil vom Netz trennen. • Keine Flüssigkeiten zum Reinigen verwenden. • Netzteil nur trocken abwischen.
	Nur aufbereitete Geräte in das Ladegerät stellen.
	Achten Sie darauf, dass das Gerät nach der Aufbereitung vollkommen trocken ist bevor Sie es wiederverwenden.
Einschränkung der hygienischen Wiederaufbereitung	Überprüfen Sie regelmäßig die Unversehrtheit des Geräts.



Reinigende Wischdesinfektion

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



- Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller kontaminierten Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

Ausstattung

- Reinigungsmittel wenn nötig: enzymatisch (z.B. neodisher MediClean)
- Desinfektionstücher:
alkoholisch (z. B. Incides N oder mikrozid universal wipes) oder
alkoholisch + quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Super Sani-Cloth)
- Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufbereitungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass diese nicht schäumen.

Durchführung

- Bei starken Verschmutzungen könne Sie zuerst mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Tuch reinigen, bevor Sie mit einem Desinfektionstuch desinfizieren.
- Reinigen und desinfizieren Sie die kontaminierten Oberflächen manuell durch Wischen.
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
- Wischen Sie die berührten Flächen besonders gründlich.
- Entfernen Sie die Rückstände und trocknen Sie das Gerät wie vom Hersteller des Desinfektionsmittels gefordert.
- Reinigen Sie das Kabel und das Netzteil nur wenn nötig und nur mit einem trockenen Tuch.

3. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen oder Verschleiß prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten oder im Falle von nicht entfernbaren Verschmutzungen entsorgen.
- Es muss eine Funktionsprüfung nach der Aufbereitung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.

